



Autres recommandations pré-analytiques :

- ▶ **Prélèvements sanguins à jeûn :** Jeûne de 8 h recommandé
- ▶ **Attention au remplissage des tubes notamment pour le tube citraté bleu (remplissage jusqu'au trait noir) sous peine de fausser le résultat**

Respecter l'ordre de prélèvement des tubes



- ▶ **Attention de bien respecter le type de tube préconisé pour chaque analyse afin de ne pas devoir re-prélever le patient.**
- ▶ **Identification des échantillons :**
 - Préciser le NOM (nom d'usage et nom de naissance)
 - Prénom
 - Date de naissance
 - Sexe

- ▶ **Informations obligatoires :**
 - Identification du préleveur
 - Date et heure de prélèvement
 - Renseignements cliniques : indication et posologie de l'anticoagulant (pour la coagulation)
 - Pour les médicaments : heure de la dernière prise, posologie
 - Hormonologie et suivi de grossesse : date des dernières règles
 - Sérologie infectieuse : notion d'immunodépression

Compléter avec précision la fiche de demande d'analyses

- ▶ **Prélèvements microbiologiques :**
Veuillez remplir le formulaire de renseignements cliniques spécifique de l'analyse

MYLAB - C2MOPREL V02 - Mars 2024 - 1^{er} print éditions / Cholet 06 77 19 46 85



Les recommandations concernant les analyses (délais, conditions de conservation et de transport) sont disponibles sur

www.myxlab.fr

Analyse	Tube	Délai ≤ 8h*	Conditions Informations particulières
Sodium	ou		
Taux de prothrombine (TP / INR)			Poso
TCK (TCA) sans HNF		≤6h	délai court
TCK (TCA) avec HNF		≤2h	délai court
Test de Coombs direct (TCD)			
Testostérone totale			A jeun
Testostérone libre, biodisponible		≤4h	A jeun délai court
Transferrine			de préférence le matin
Triglycérides			A jeun
Trisomie 21 (dépistage pré natal)		≤4h	consentement délai court
Troponine us		≤8h	
TSH, T3 Libre, T4 libre			heure fixe
Urée			
Vitamine A	gel	≤1h30	LABO, délai court
Vitamine B6		≤4h	LABO, délai court
Vitamine B12			
Vitamine E	gel	≤1h30	LABO, délai court
Vitamine D			
VS			

HN : examen hors nomenclature non remboursé, accord du patient préalable nécessaire

LABO : prélèvement à effectuer au laboratoire uniquement

Poso : préciser la posologie du traitement, l'heure de la dernière prise, l'indication

gel: pas de tube avec séparateur (gel)

spécial : tube(s) spécifique(s) à demander au laboratoire

délai court : examen ayant des conditions de conservation particulières avec un délai court nécessitant d'être acheminé rapidement au laboratoire

Frigo : l'échantillon doit être conservé au réfrigérateur

repos : analyse nécessitant un repos avant le prélèvement

Urg : à acheminer immédiatement après le prélèvement - Retourner l'étiquette urgent

A jeun : un jeûne de 8 h minimum doit être respecté

 : à conserver à l'abri de la lumière

heure fixe : pour un meilleur suivi, le prélèvement doit toujours se faire au même moment de la journée

***délai < 8 h :** délai d'acheminement au laboratoire < 8 h

consentement : examen devant être accompagné des documents : attestation de consultation, consentement signé du patient et prescription

Pour tout renseignement complémentaire, consulter

www.myxlab.fr

Analyse	Tube	Délai < 8 h*		Conditions Informations particulières
Ac anti-CCP				
Ac anti-DNA et anti-antigènes nucléaires solubles (SSA, SSB...)				
Ac anti-cardiolipines /phospholipides / β2GP1				
Ac anti-transglutaminase, anti-endomysium				
ACE				
Acide hyaluronique				
Acide urique				
ACTH	Spécial	≤4h		LABO
Albumine				
Aldostérone		≤4h		debout/couché
Allergies (IgE totales et spécifiques, allergènes)				
α foeto-protéine (AFP)				
AMH				
Amylase				
Anticoagulants circulants type lupique (ACC)		≤4h		
Ac anti-nucléaires totaux				
Ac anti-thyroïdiens (ATG/ATPO), Ac anti-récepteurs de la TSH (TRAK)				
Antithrombine III		≤ 4h		
Apolipoprotéine A1 /B				A jeun
ASAT (TGO) / ALAT (TGP)				
ASDO (anti-streptodornase B) ASLO (anti-streptolysines O)				
β2 microglobuline				
βHCG				
Bicarbonates (Réserve alcaline - CO2)				
Bilan hépatique complet	et			1 rouge et 1 bleu
Bilirubine totale, conjuguée (directe)				
BNP				
NT-proBNP				
CA 125, CA15-3, CA19-9				
Calcium, calcium corrigé				
Calcitonine		≤4h		Délai court
Calcium ionisé	ou	≤ 1h	≤ 30 mn	LABO - HN délai court
Caryotype	gel			consentement
Catécholamines - dérivés méthoxylés	gel	≤1h		A jeun, repos, au labo
CDT (Transferrine carboxy-déficiente)				
Charges virales (HIV)		≤4h		délai court

Analyse	Tube	Délai < 8h*		Conditions Informations particulières
Charges virales (Hépatites)	ou	≤4h		délai court
Chlore	ou			
Cholestérol (HDL et LDL)				A jeun
Cholestérol total				A jeun
Chromogranine A		≤4h		délai court
Complément C3-C4				
Cortisol				Avant 9h le matin
CPK				
Créatinine				
CRP				
CRP ultrasensible				
Cryoglobuline - cryofibrinogène				Au LABO
D-dimères				
Électrophorèse des protéines sériques, IEP				
Estradiol				
Facteurs de coagulation II, V, VII, X	1	≤4h		délai court
Facteurs de coagulation VIII, IX, XI, XII, XIII Willebrand	2	≤4h		délai court
Facteur rhumatoïde (latex, Waaler rose)				
Fer, coef. de saturation de la transferrine				de préférence le matin
Ferritine				
Fibrinogène				
Folates (Vitamine B9)				A jeun
Folates (Vit B9) érythrocytaires				A jeun
Ferritine				
Fibrinogène				
FSH				
GGT				
Glucosamine - Fructosamine				
Glycémie				A jeun
Groupes sanguins ABO Rh Kell + Phéno				2 prélèvements différents si 2déterminations
Haptoglobine				
HbA1c -Hémoglobine glyquée				
Héparinémie (Activité antiXa HBPM, HNF)		≤1h		LABO , délai court, Poso
Héparinémie (Pradaxa®, Xarelto®, Eliquis®)		≤1h		HN délai court- Poso

Analyse	Tube	Délai < 8h*		Conditions Informations particulières
HLA B27				consentement, HN
Immunoglobulines G,A,M, E				
Immunophénotypage lymphocytaire				consentement
Lymphocytes CD3/CD4/CD8				
Lactates			≤30min	LABO
LDH			≤8h	délai court
LH sérique				
Lipase				
Magnésium				
Médicaments dosage (envoi Biomnis)	gel			Poso, +/- tube gel voir conditions Biomnis
Mutation facteur II - Prothrombine				consentement
Mutation facteur V Leiden				consentement
Numération formule sanguine, VGM				
Orosomucoïde				
Paludisme (recherche)			Urg	Urg
Parathormone (PTH)		≤ 4h	≤ 12h	délai court sur rouge
Phadiatop®, Trophatop®				
Phosphatases alcalines (PAL)				
Phosphore (phosphates)				
PINI				
Plaquettes				
Plaquettes sur tube citraté	1 1			
Potassium	ou	≤ 6h	≤ 4h	délai court
Préalbumine				
Procalcitonine (PCT)				
Progesterone				
Prolactine				de préférence au repos
Protéine C - Protéine S		≤4h		LABO ,délai court, arrêt AVK (1 mois)
Protides totaux				
PSA				
PSA libre			≤5h30	délai court
Quantiféron	Spécial			LABO - remboursé sous condition
RAI (recherche d'agglutinines irrégulières)				
Réticulocytes				
Sérologies bactériennes : Syphilis (BW), mycoplasmes, Lyme...				
Sérologies virales et parasitaires: Hépatites, Rubéole, Toxo, CMV, EBV (MNI), HIV,...)				